


在宅医療器具の消毒方法

薬杯・すいのみ


薬杯や、すいのみは使用つど、水洗いと消毒を行いましょう。

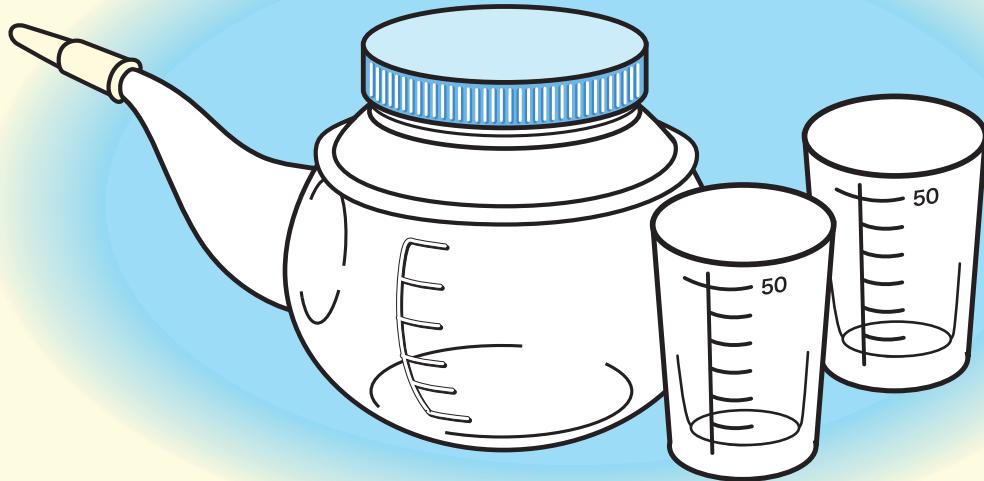

洗浄


薬杯・すいのみは使用後、よく洗ってください。

- すいのみは、使用のつど、吸い口を外し、内部は専用ブラシでしっかり洗浄してください。

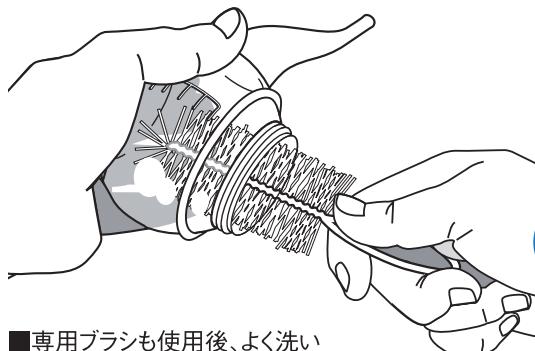

■ 専用ブラシも使用後、よく洗い十分に乾燥させてください。できれば2本用意して1日ごとに交換して使用することをお勧めします。

- 薬杯も、使用のつど、しっかり洗いましょう。

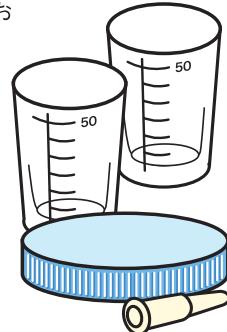

消毒

洗浄後、0.0125%の次亜塩素酸ナトリウム（ミルトン80倍希釀液）に1時間以上浸けます。


- 薬杯やすいのみ内に空気が残らないよう、消毒液に浸し、1時間以上浸け置きしてください。



保管

- 消毒終了後、よく乾燥させて保管してください。

※ 消毒後の水洗いは行っても行わなくてもどちらでも結構です。

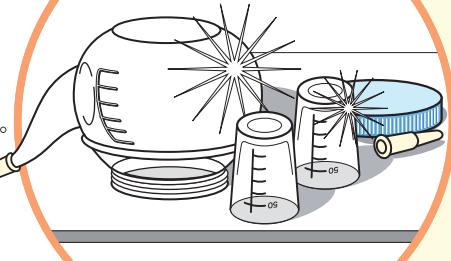


こんな器具類は消毒が必要です。

	消毒の方法	
	熱湯消毒	塩素系消毒剤 につける
経管栄養の バッグ・チューブ		●
ネブライザーの 薬液カップ、蛇管		●
薬杯、すい飲み		●

	消毒の方法	
	熱湯消毒	塩素系消毒剤 につける
おしごり	●	●
まな板	●	●
調理器具	●	

ミルトンの80倍希釈液の調製方法

80倍希釈液は濃度0.0125% (125PPM) です。

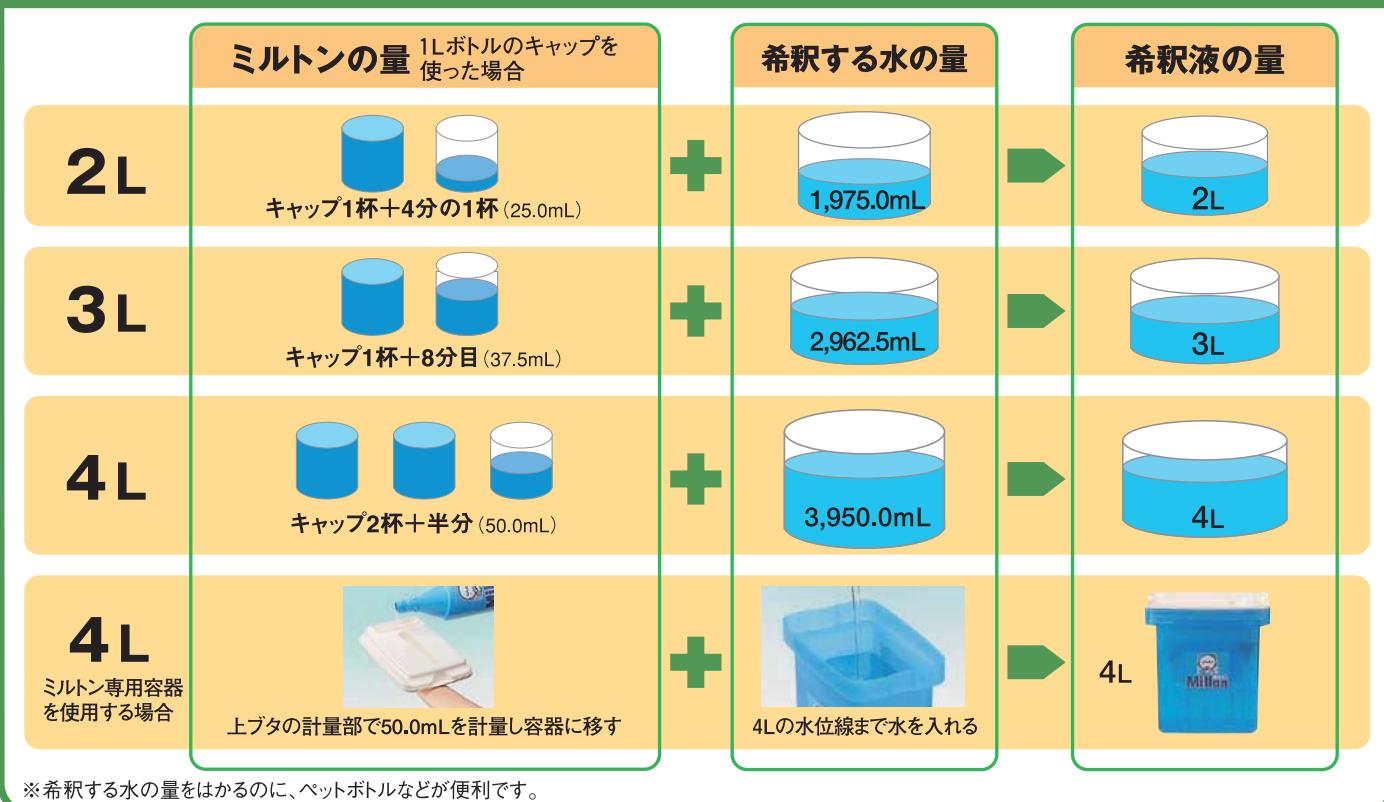

ミルトンを正しくお使い頂くために

- POINT** 器具が十分消毒液に浸かっている事を確認しましょう。
 - POINT** 消毒をする前には、十分に洗浄し、しっかり汚れを落としておきましょう。
 - POINT** 浸け置きに使う容器は、遮光性の高い容器を使用し、できればフタのできる物をお使いください。
- 他の洗剤や消毒剤との混合はしないでください。
●ステンレスを含む金属製品の消毒には使用しないでください。
●手の荒れやすい人は炊事用手袋をご使用ください。

衛生器具・ガーゼ・器具の消毒に

- ★幅広い微生物に対し消毒・殺菌効果を示します。
- ★有機物に接触すると塩化ナトリウムに分解し低残留です。



ミルトン

ミルトンについてのご質問は
0120-093610



Milton ミルトン

第2類医薬品

※使用上の注意、効能、用法・用量等は説明文書をお読みください。